

DIE KRAFTVOLLE LÖSUNG –

AUCH FÜR EHER
EMPFINDLICHE
AUGEN GEEIGNET.

AO SEPT. PLUS



Alcon


AOSEPT® PLUS – auch für eher empfindliche Augen geeignet

- **Kraftvolle DREIFACH-Wirkung** dank einer außergewöhnlichen Wirkstoff-Kombination.
- Schonend für die Augen, da **ohne Konservierungsstoffe**.
- Tiefenreinigung für **lang anhaltenden Tragekomfort**.
- Ideal für moderne (Silikon-Hydrogel) Kontaktlinsen.

ohne
Konservierungsstoffe




Kraftvolle DREIFACH-Wirkung

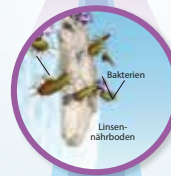


1. Desinfiziert

Das Wasserstoff-Peroxid durchdringt die Kontaktlinse, tötet Keime und Bakterien und bewirkt so eine hohe Desinfektion.

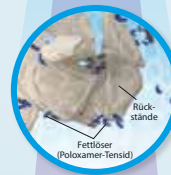


2. Reinigt

Das integrierte Poloxamer-Tensid löst und entfernt Rückstände und Proteinablagerungen.

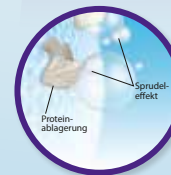

3. Entfernt Proteine

Durch den mechanischen Sprudleffekt wird die Ablösung von proteinhaltigen Ablagerungen auf der Linsenoberfläche unterstützt.

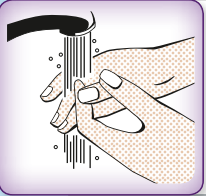


- 1. Vor dem Abnehmen:
Hände waschen**
Hände gründlich waschen
und gut trocknen.




- 2. Linsen abnehmen**



- 3. Im Behälter platzieren**
Rechte und linke Linse in
die entsprechenden
Körbchen
einlegen.

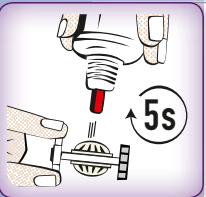


- 4. Power-Dusche**
Linsen im Körbchen 5 Se-
kunden mit AOSEPT® PLUS
abspülen.

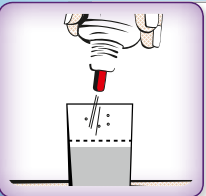


- 5. Behälter befüllen**
Behälter bis zum Markier-
strich mit AOSEPT® PLUS
füllen und verschließen.
Aufrecht stellen.




- 6. Einlagerung und
Neutralisation**
Linsen mindestens 6
Stunden in der Lösung
lassen.

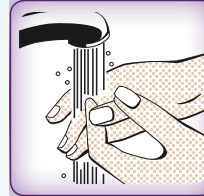

- 7. Vor dem Aufsetzen:
Hände waschen**
Hände gründlich waschen
und gut trocknen.

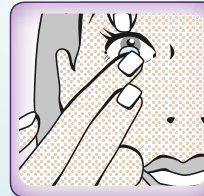

- 8. Linsen aufsetzen**
Bei Bedarf Linsen mit
Kochsalzlösung (nicht
AOSEPT® PLUS) abspülen
und aufsetzen.

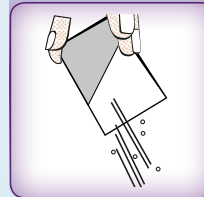

- 9. Lösung ausgießen**
Behälter ausgießen, mit
Kochsalzlösung ausspülen
und an der Luft trocknen
lassen.

Weitere Informationen finden Sie in
der Gebrauchsanweisung in jeder
AOSEPT® PLUS Packung.

Unsere Empfehlung: AIR OPTIX® – hoch sauerstoff- durchlässige Kontaktlinsen

Ein starkes Team – AOSEPT® PLUS ist perfekt auf AIR OPTIX® Monatslinsen abgestimmt.

Dank ihrer hohen Sauerstoffdurchlässigkeit und der ablagerungsresistenten Oberfläche bieten die AIR OPTIX® Kontaktlinsen einen besonders hohen Tragekomfort. Tag für Tag und auch bei längerem Tragen.



Feuchtigkeitsspeichernd –
für hohen Tragekomfort –
den ganzen Tag lang



Hoch sauerstoffdurchlässig –
AIR OPTIX® Kontaktlinsen lassen
mehr Sauerstoff an das Auge als
herkömmliche Hydrogel-Kontakt-
linsen* - für weiße, gesund aus-
sehende Augen.



Ablagerungsresistent –
für eine klare Sicht



... auch für Hornhautverkrümmung und
als Gleitsichtlinse erhältlich.

* Basierend auf dem Verhältnis der Sauerstofftransmissibilität, Alcon, Data on File 2008, 2009.